

Begleitprotokoll zur Entnahme von Haarproben

Angaben zum Tierbesitzer

Name: _____
 Kd.Nr.: _____
 Tel.Nr.: _____
 E-Mail: _____

Tierart

Pferd

 Rind

 Schwein

Angaben zur Probe

Probennummer	VVVO-Nummer	Tiername

Anleitung zur Probenahme

- ▶ **dicke Haare** aus Schweif, Mähne, Schwanzquaste o.ä. mit **deutlich sichtbarer Haarwurzel** verwenden
- ▶ dem Tier **15 Haare mit Wurzel** ausziehen (**nicht** abschneiden! Haare ohne Wurzel sind für uns wertlos)
- ▶ Haare so **bündeln**, dass die **Haarwurzeln in Pfeilrichtung** weisen (siehe Beispiel rechts)
- ▶ **Haarbündel** mit Klebestreifen in das **Pfeilfeld** kleben. Die **Haarwurzeln** müssen in dem dafür vorgesehenen Feld ca. **1,5 cm** über den Klebestreifen **hinausragen**, damit diese im Labor abgeschnitten werden können
- ▶ die am unteren Ende über den Klebestreifen **hinausragenden Haarenden** mit der Schere **abschneiden**

